
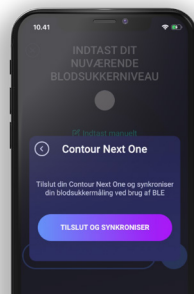
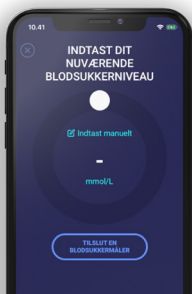




## Sådan tilsluttes og anvendes CONTOUR® NEXT ONE i Hedia via Bluetooth®

1. Start med at kontrollere at Bluetooth er slået til på din telefon.
2. Kontroller at klokkeslæt på din blodsuktermåler stemmer overens med klokkeslæt på din telefon. Hvis de ikke stemmer overens, indstil da klokkeslæt på din blodsuktermåler.
3. Lav nu en ny tidssvarende blodsuktermåling.
4. Sæt så din CONTOUR® NEXT ONE i forbindelsestilstand
  - a. Sluk din blodsuktermåler.
  - b. Hold 'OK' knappen nede indtil din måler blinker blåt fra teststrimelporten.
  - c. Skærmen på din måler vil nu vise et blinkende Bluetooth ikon, og apparatets serienummer vises.
  - d. Din blodsuktermåler er nu klar til at blive forbundet med Hedia.
5. Åben Hedia.
6. I Hedia tryk på  knappen på dashboardet (forsiden).



7. Tryk på 'tilslut en blodsuktermåler' for at starte indstillingen.


8. Der vises en liste over understøttede enheder - tryk på CONTOUR® NEXT ONE.

9. En info-skærm popper op - tryk på 'Tilslut og synkroniser' for at parre enheden.

10. Der vises en indlæsnings-skærm mens Hedia søger efter din CONTOUR® NEXT ONE måler.


### Android telefon

- a. Tryk Connect på din telefon.
- b. Tryk OK på spørgsmålet om bluetooth forbindelse.
- c. Sluk og tænd for CONTOUR® NEXT ONE
- d. Tryk nu Connect.

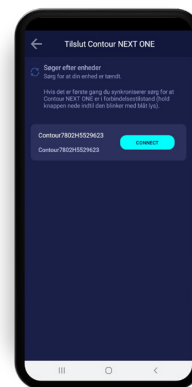

### Apple telefon

- a. Tryk Connect på din telefon.
- b. Tryk Dan par på spørgsmålet om bluetooth forbindelse.

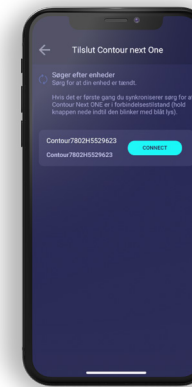

11. Din seneste blodsuktermåling vil nu blive overført fra din CONTOUR® NEXT ONE måler til Hedia.

12. Din CONTOUR® NEXT ONE måler er nu din standard blodsuktermåler i Hedia og synkroniserer således automatisk ved tryk på knappen 'Synkroniser blodsuktermåler'.



Contour og contour logo er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holding AG

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks here in is under license

